

Anwendungsmöglichkeiten

Softa® Cloth CHX 2% Desinfektionstuch für Medical Devices

WISCHDESINFEKTION FÜR MEDIZINPRODUKTE:

Softa® Cloth CHX 2 % ist zugelassen als Medizinprodukt nach Medical Device Directive 93/42. Sterile, einzeln verpackte Desinfektionstücher. Keine Aerosolbildung, da auf Sprühen verzichtet wird.

MIKROBIOLOGISCHE WIRKSAMKEIT:

Softa® Cloth CHX 2 % ist wirksam gegen Bakterien und Hefepilze mit remanenter Wirksamkeit.

WANN?

Zur Wischdesinfektion und Reinigung von Konnektionsstellen im Prozess der sicheren Infusionstherapie.




1. Hygienische Händedesinfektion nach Hausstandard durchführen.

Optional: Anlegen von medizinischen Einmalhandschuhen.



2. Softa® Cloth CHX 2% - Verpackung öffnen, Desinfektionstuch entnehmen und entfalten.

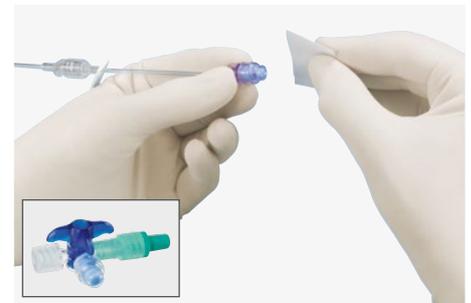

3. Visuell reine Oberflächen: Konnektionsstelle des Medical Devices (Bsp.: Membrankonnektor) abwischen und abtrocknen lassen; Tuch verwerfen.

Sichtbare Verunreinigungen: Konnektionsstelle des Medical Devices (Bsp.: Membrankonnektor) abwischen; Tuch verwerfen; mit 2. Tuch Konnektionsstelle erneut abwischen und abtrocknen lassen. Bakterizidie (prEN13727) und Levurozidie (prEN13624): 15 Sek. (reine und unreine Bedingungen).



4. Konnektion vornehmen Ggf. offene Zuspritzstelle (bei Einsatz ohne Membrankonnektoren) mit neuem, sterilem Verschlussstopfen verschließen.



5. Hygienische Händedesinfektion nach Hausstandard durchführen.

Bei optionalem Tragen von Handschuhen: Handschuhe ausziehen und verwerfen. Anschließend hygienische Händedesinfektion nach Hausstandard durchführen.