

Askina® Trachea

Schaumstoff-Auflage für die Tracheostomieversorgung.



B. Braun WoundCare

Askina® Trachea

Hochabsorbierende Schaumstoff-Auflage

Befreit von Wunden. B. Braun WoundCare.

Exzellentes Transsudatmanagement

Minimierung der Hautmazeration

Atraumatischer, schmerzloser Verbandwechsel

Sehr gute Passform für Drainagen

Bester Tragekomfort

Sehr gute Polsterungseigenschaften

Kosteneffizienz durch seltenere Verbandwechsel

Anwendungshinweise

- 1 Reinigen Sie die Eintrittsstelle mit einer geeigneten Reinigungslösung (z. B. Polyhexanid) und trocknen Sie die Eintrittsstelle und die umliegende Haut anschließend sorgfältig ab.
- 2 Legen Sie die Askina® Trachea Schaumstoff-Auflage an die Tracheostomiekannüle bzw. die Drainage an.
- 3 Askina® Trachea verfügt über eine sehr gute Passform - im Einzelfall kann die Schaumstoff-Auflage aber noch zusätzlich passend zugeschnitten werden.
- 4 Bei Bedarf kann die Schaumstoff-Auflage zusätzlich fixiert werden.
- 5 Überprüfen Sie das Tracheostoma regelmäßig. Askina® Trachea kann mehrere Tage auf der Haut verbleiben - maximal jedoch, bis Transsudat durch die Auflage zu sehen ist.
- 6 Beim Wechsel der Schaumstoff-Auflage zuerst die Fixation entfernen und dann Askina® Trachea von der Haut abnehmen.

Produkt	Größe	VE	PZN	REF
Askina® Trachea	9,5 x 8,5 cm	10 Stück	2499972	7248510

Zur Versorgung von Trachealkanülen und anderen Drainagen.

Askina® Trachea ist ein nicht haftender Verband zur Abdeckung von Hautarealen um Trachealkanülen und anderen Drainagen, bestehend aus zwei sich ergänzenden Polyurethan-Lagen:

Polyurethan-Schaum (wundseitig)

- › hydrophil
- › atmungsaktiv
- › hochabsorbierend

Polyurethan-Film

- › transparent
- › Wasserdampf durchlässig
- › für Flüssigkeiten und Bakterien undurchlässig

