

Askina® DresSil Heel

Der silikonbeschichtete Schaumstoffverband mit Haftrand für die Ferse



Wunde

Neu
...individuell an den
Fuß modellierbar!

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Askina® DresSil Heel

Der silikonbeschichtete Schaumstoffverband mit Haftrand für die Ferse



Askina® DresSil Heel

- ① Silikon-Haftfläche
- ② Silikon-Haftrand
- ③ Polyurethanschaum
- ④ Polyurethanfilm

Optimal zur Versorgung von Wunden im Bereich der Ferse sowie des Innen- und Außenknöchels

Sichere und hautschonende Hafteigenschaften durch Silikonbeschichtung

Druckentlastende Eigenschaften des Polyurethanschaums können der Entstehung von Wunden vorbeugen

Einfaches und schnelles Anlegen und Entfernen

Sehr gutes Exsudatmanagement

Einsatzgebiete


Askina® DresSil Heel kann verwendet werden bei

- Dekubitalulcera
- Diabetischen Fußulcera
- Chirurgischen Wunden

Produkt	Größe	VE	PZN	REF
Askina® DresSil Heel	22 x 21,6 cm	5 Stück	10397323	5592205



In wenigen Schritten zum Ziel:

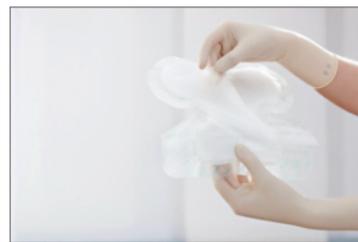

Ziehen Sie die obere Schutzfolie ab.



Platzieren Sie die Ferse oberhalb der unteren Schutzfolie auf dem Verband.



Modellieren Sie den Verband an Innen- und Außenknöchel an und lösen Sie die untere Schutzfolie.



Modellieren Sie den Verband abschließend an die Ferse. Fertig!