




HISTOACRYL® SET LAPAROSKOPISCH

ZUR NERVENSCHONENDEN NETZFIXIERUNG –
IN DER LAPAROSKOPISCHEN HERNIENCHIRURGIE

HISTOACRYL® SET LAPAROSKOPISCH

ZUR NERVENSCHONENDEN NETZFIXIERUNG –
IN DER LAPAROSKOPISCHEN HERNIENCHIRURGIE

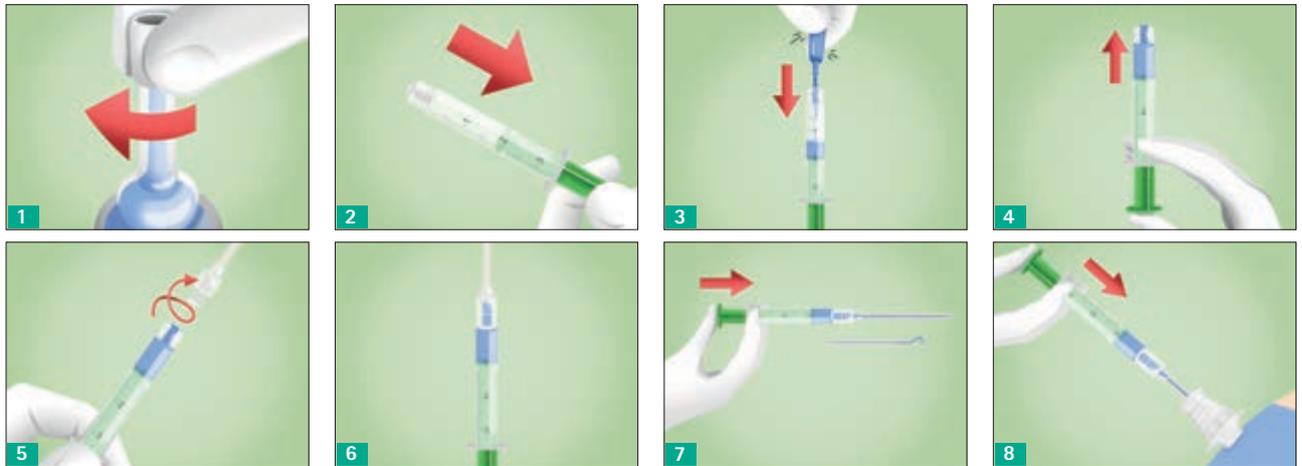

1. Abschrauben der Ampullenspitze von Histoacryl®.
 2. Zurückziehen des grünen Kolbens bis 2 ml Volumen vorhanden.
 3. Einführen der offenen Ampullenspitze in den Spritzenkörper, festes Zusammendrücken der Histoacryl® Ampulle bis sich der gesamte Inhalt in der Spritze befindet.
 4. Entlüften der Spritze, bis Histoacryl® Kleber die Spitze der Spritze erreicht.
 - 5.+6. Befestigung der Kanüle an der entlüfteten Spritze, Festschrauben des Luer-Lock-Anschluss.
 7. Vordrücken des grünen Kolbens bis erster Tropfen Histoacryl® in der Kanülenspitze erscheint.
 8. Schieben der Schutzhülle über die Spitze der Kanüle, Einführen durch den Trokar. Halten der Applikationsspitze an den gewünschten Fixationsbereich des Netzes, vorsichtiges Drücken des grünen Kolbens.
- Punktueller Auftrag – Wenige Tropfen ausreichend.
 - Zurückziehen des Applikationssystems vor Setzen eines neuen Fixierungspunktes, um ein Verkleben der Kanülenspitze zu vermeiden – Bei Verstopfung der Kanülenspitze während der Anwendung: Herausziehen des Systems aus dem Patienten und Beseitigung der Verstopfung, indem die Spitze mit trockenem Mull abgerieben oder ein Teil abgeschnitten wird.
 - Entfernung des Applikationssystems – Sicherstellung, dass die Kanülenspitze vor Entfernung von der Schutzhülle bedeckt ist, um eine Kontamination des Trokars mit Histoacryl®-Resten zu vermeiden. Dabei Festhalten der Schutzhülle am dicken Ende.

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Inhalt
Histoacryl® Lap Mesh Fixation	1050165	5 x 0,5 ml Histoacryl® 5 x LapFix Applikator
	1052008	2 x 0,5 ml Histoacryl® 1 x LapFix Applikator



AESCULAP® – a B. Braun brand

Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Deutschland
Tel. 07461 95-0 | Fax 07461 95-2600 | www.aesculap.de

Die Produktmarke „Histoacryl“ ist eine eingetragene Marke der B. Braun Melsungen AG.
Die Hauptproduktmarke „Aesculap“ und die Produktmarke „Optilene“ sind eingetragene Marken der Aesculap AG.
Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Information über unsere Erzeugnisse verwendet werden. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.