

# Intrafix® SafeSet Flush

Infusionssystem für eine verbesserte Medikamentenapplikation in der Verwendung mit einer Spülspritze

## 1 EINSTECHEN DES DORNS IN DAS INFUSIONSLÖSUNGSBEHÄLTNIS



1. Überprüfen Sie, ob die Belüftungsklappe geschlossen und die Rollenklammer geöffnet ist.
2. Stechen Sie den Dorn des Intrafix® SafeSet Flush in das Behältnis ein.
3. Rollenklammer schließen.
4. Tropfkammer kopfüber halten und Rollenklammer öffnen. Befüllen Sie die Tropfkammer bis zum grünen Umspritzungsring (siehe Abbildung).
5. Tropfkammer wieder in die Ausgangsposition bringen. Durch initiales Drücken der Tropfkammer bringen Sie das System zum Laufen. Entlüften Sie die Leitung nun vollständig mit dem Medikament. Schließen Sie anschließend die weiße Klemme des Intrafix® SafeSet Flush.
6. Verbinden Sie das Infusionssystem mit dem Venenzugang.

## 2 START DER MEDIKAMENTEN-APPLIKATION



1. Öffnen Sie die weiße Klemme des Intrafix® Safe Set Flush und regulieren Sie die Durchflussrate über die Rollenklammer. Applizieren Sie dem Patienten die vollständige Menge des Medikaments.
2. Desinfizieren Sie das integrierte nadelfreie Membranventil am Intrafix® Safeset Flush.

## 3 SPÜLUNG DES INFUSIONSSYSTEMS UND ENTSORGUNG



Schrauben Sie eine geeignete Spülspritze (z.B. Omniflush®) auf das integrierte nadelfreie Membranventil am Intrafix® SafeSet Flush und spülen Sie das System. Das Spülen mit einer geeigneten Spritze (z.B. Omniflush®) hilft, das Restvolumen des Medikaments in der Infusionsleitung zu reduzieren. Die weiße Klemme oberhalb der Tropfkammer bleibt geöffnet. Die Rollenklammer in Flussrichtung muss ebenfalls in geöffneter Position bei gleicher Flussrate verbleiben.

**Hinweis:** Lassen Sie die Rollenklammer in Flussrichtung geöffnet und applizieren Sie die Spüllösung mit der gleichen Geschwindigkeit, wie das verschriebene Medikament. Die Rollenklammer sollte beim Spülen mit einer Spritze nicht ganz geöffnet sein! Vermeiden Sie das Spülen mit hohem Druck.

Bitte kontrollieren Sie immer den Flüssigkeitsspiegel in der Tropfkammer. Falls notwendig, füllen Sie die Tropfkammer durch Drücken des Tropfkammerunterteils ein weiteres Mal. Die Rollenklammer ist zuvor in geschlossene Position zu bringen.

Das System kann anschließend vom Patientenzugang dekonnektiert und verworfen werden.