


Aesculap[®] AdTec[®] needle holder

Suturing made simple

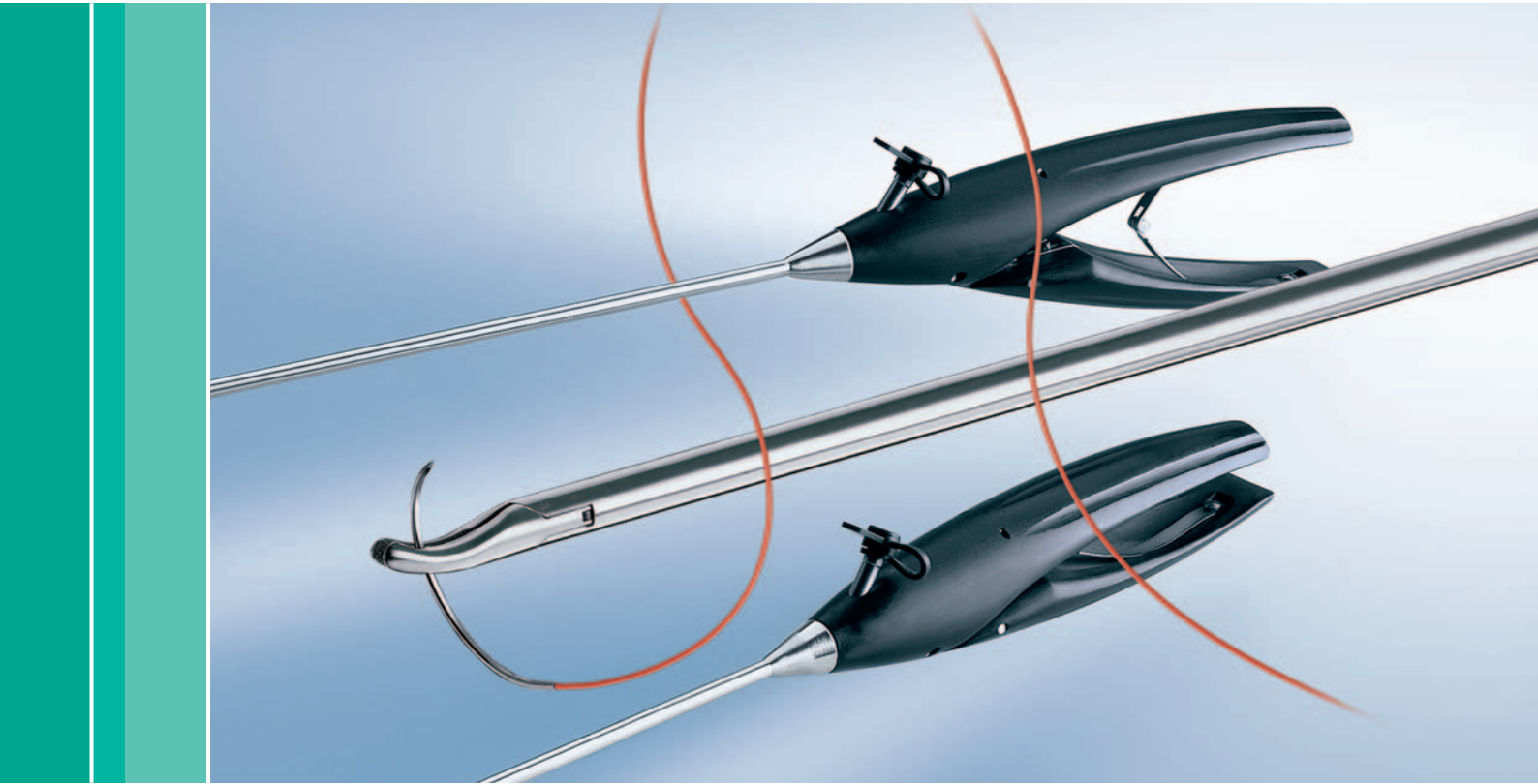

Aesculap Endoscopic Technology

Aesculap® AdTec® needle holder

Expertise in Surgery

Innovation of the Year

The new generation of Aesculap needle holders has been awarded as the Innovation of the Year 2004 by "Society of Laparoendoscopic Surgeons".

Innovation des Jahres

Die neue Generation von Aesculap Nadelhaltern wurde durch die „Society of Laparoendoscopic Surgeons“ mit dem Innovationspreis des Jahres 2004 ausgezeichnet.



With these needle holders, Aesculap offers a range of instruments specially developed for suturing and knotting. The new axial handle allows the instruments to be rotated very easily. The matching combinations of needle holders enable safe and efficient working.


Mit diesen Nadelhaltern bietet Aesculap ein speziell zum Nähen und Knoten entwickeltes Instrumentarium an. Durch den neuen axialen Handgriff können die Instrumente sehr einfach rotiert werden. Mit den aufeinander abgestimmten Nadelhalter Kombinationen ist ein sicheres und effizientes Arbeiten möglich.

- Precise grip on curved and straight needles; secure grip on the suture thread.
 - Integrated overload protection allows holding course needles as securely as fine ones.
 - Ergonomic working posture through axial handle design. The axial arrangement allows holding the instrument in any position.
 - Simple lock with just two fixed positions following the push ballpoint principle. The needle can thus be gripped securely with the lock either engaged or released.
 - Easier suturing and knotting through mutually corresponding instrument combinations.
 - All-purpose needle holders available in different diameters and lengths.
 - Long life span: all DUROGRIP needle holders with tungsten carbide inserts in jaw parts.
-
- Präzises Fassen von gebogenen und geraden Nadeln und sicheres Greifen des Fadens.
 - Durch den eingebauten Überlastungsschutz im Instrument können grobe Nadeln ebenso sicher gehalten werden wie feine.
 - Ergonomische Arbeitsweise durch axialen Handgriff. Durch die axiale Anordnung kann das Instrument in jeder Position gehalten werden.
 - Einfache Sperre mit nur zwei Rastpositionen nach dem Kugelschreiberprinzip. Die Nadel kann somit mit arretierter und gelöster Sperre sicher gefasst werden.
 - Erleichtertes Nähen und Knoten durch miteinander korrespondierende Instrumentenkombinationen.
 - Universell einsetzbare Nadelhalter, die in unterschiedlichen Durchmessern und Längen verfügbar sind.
 - Lange Lebensdauer: alle DUROGRIP Nadelhalter mit Hartmetalleinlagen in den Maulteilen.

Aesculap® AdTec® needle holder

Expertise in Surgery

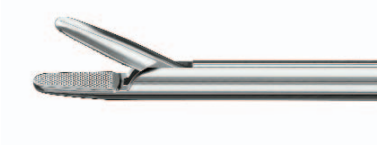

			Catalog number Artikelnummer
DUROGRIP Needle holder straight Nadelhalter gerade	3.5 mm/200 mm 3.5 mm/290 mm 5 mm/310 mm 5 mm/370 mm 5 mm/420 mm	 1:1	PL419R PL418R PL407R PL404R PL416R
DUROGRIP Needle holder curved left Nadelhalter links gebogen	5 mm/310 mm 5 mm/370 mm 5 mm/420 mm		PL408R PL405R PL417R
DUROGRIP Needle holder curved right Nadelhalter rechts gebogen	5 mm/310 mm 5 mm/370 mm		PL413R PL415R
DUROGRIP Assist. needle holder, 2 x 3 teeth Assist. Nadelhalter, 2 x 3 Zähne	5 mm/310 mm		PL409R
CROCE/OLMI DUROGRIP Needle holder fenestrated DUROGRIP Nadelhalter gefenstert	5 mm/310 mm		PL410R
CROCE/OLMI DUROGRIP Needle holder crimped DUROGRIP Nadelhalter gekröpft	5 mm/310 mm	 1:1	PL411R
DUROGRIP Needle holder curved left Nadelhalter links gebogen	10 mm/310 mm		PL412R

Aesculap® AdTec® needle holder

Expertise in Surgery



Catalog number
ArtikelnummerSUPER-righting needle holder
SUPER-righting Nadelhalter

5 mm/310 mm


PL414R

SUPER-righting needle holder.

Allow automatic upright positioning of the needle at different angles to the instrument shaft.

Selbstaufrechtender Nadelhalter.

Ermöglicht das selbsttätige Aufrichten der Nadel in unterschiedlichen Winkelstellungen zum Instrumentenschaft.

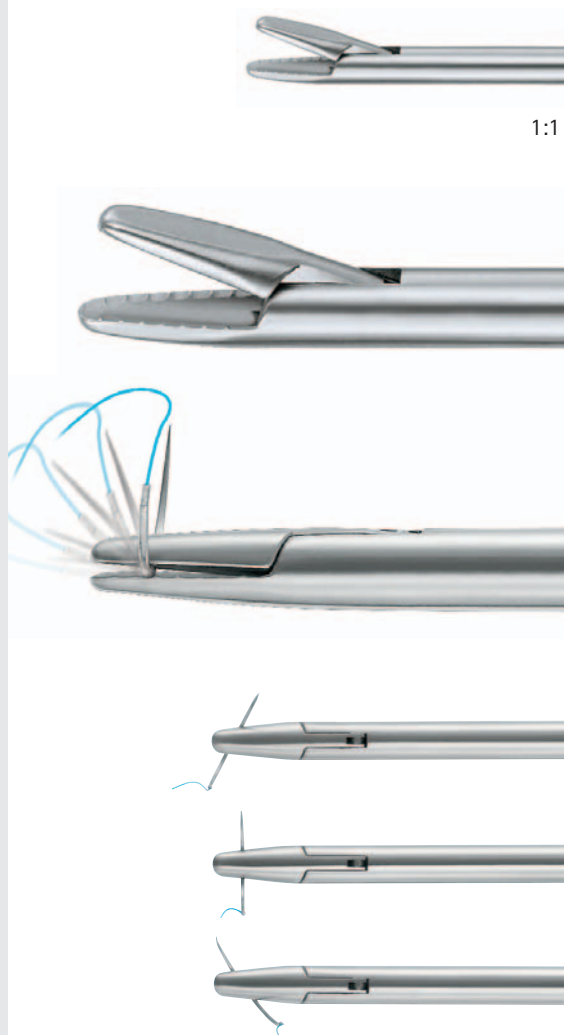Additional instrument with same handle
Zusätzliches Instrument mit gleichem Handgriff

Anvil Grasper

Anlegezange für Gegendruckplatte
eines Circular-Staplers 10 mm/370 mm

PL406R



