

Gebrauchsanweisung
Braunostat® U
 Infusionsständer

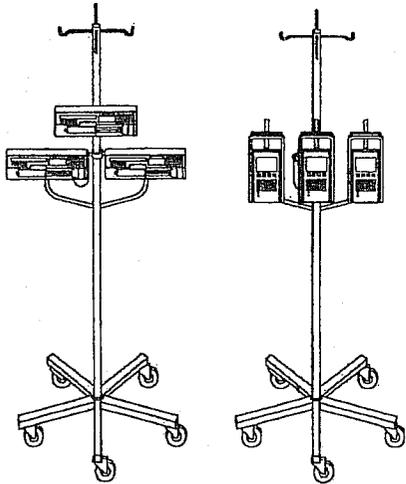


Abb. 1

Abb. 2

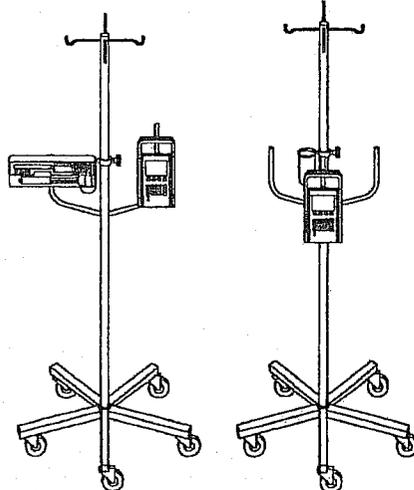


Abb. 3

Abb. 4

1. Allgemeines / Zweckbestimmung

Der Braunostat® U ist ein Sicherheitsinfusionsständer mit kipp sicherem Fuß, der dem Medizinproduktegesetz (MPG) entspricht. Er dient zur Aufnahme von bis zu drei Infusionspumpen der B. Braun Melsungen AG und bis zu vier Infusionslösungsbehältern von je 1000 ml Füllvolumen.

2. Anbringung der Infusionspumpen und Infusionslösungsbehälter

Die Anbringung der Infusionspumpen muss gemäss Abb. 5 erfolgen.

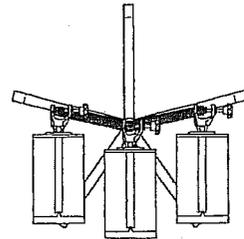


Abb. 5

Beispiele für die verschiedenen Kombinationen siehe Abb. 1 bis 3. Wird nur eine Infusionspumpe verwendet, so ist diese grundsätzlich am Stativrohr unterhalb der Klemmschraube zu befestigen, Abb. 4. Die Aufhängung der Infusionslösungsbehälter erfolgt an dem höhenverstellbaren Stativ. Das Stativ ist gegen ein versehentliches Ausheben gesichert.

3. Elektrischer Anschluss

Zur Spannungsversorgung der am Braunostat® U angebrachten Infusionspumpen kann die Dreifachnetzanschlussleitung verwendet werden. Achtung: Die Gebrauchsinformation der Dreifachnetzanschlussleitung ist zu beachten.

Gebrauchsanweisung
Braunostat® U
 Infusionsständer

4. Laufrollen-Feststellung

Zur Sicherung gegen unbeabsichtigtes Wegrollen müssen beide Rad-Feststeller betätigt werden.

5. Wartung, Reinigung und Sterilisation

Der Braunostat® U ist bis auf notwendige Reinigungsarbeiten wartungsfrei. Zur Desinfektion empfehlen wir das Oberflächendesinfektionsmittel Melsept® SF. Der Braunostat® U kann sowohl gas- als auch dampfsterilisiert (121°C) werden.

6. Weitere Sicherheitshinweise:

Der Braunostat® U ist nicht für den Betrieb in explosionsgefährdeter Umgebung bestimmt. Beim Transport des Infusionsständers ist das obere Stativrohr einzuschieben. Es ist nicht zulässig, an die Flaschenaufhängung schwere Gegenstände anzubringen (Kippgefahr).

7. Technische Daten

Werkstoffe	: rostfreier Stahl (Stativrohre) verzinkt, chromatisiert/ Kunststoff (Lenkrollen)
Rollendurchmesser	: 75 mm, antistatisch
Fußdurchmesser	: 650 mm
Höhenverstellbereich	: 1.260 – 2.200 mm
Gewicht	: 8,0 kg
Zul. Schwellhöhe	: 2,5 cm
Zul. Belastung	: 40 kp

Vertrieb für Österreich:
 B. Braun Austria Ges.m.b.H.
 In den Langäckern 3 – 5
 A-2344 Maria-Enzersdorf
 Telefon (0 2236) 4 65 41 –0

Vertrieb für die Schweiz:
 B. Braun Medical AG
 Seesatz, Postfach 21
 CH-6203 Sempach-Station
 Telefon (0 41) 4 62 62 44

8. Bestelldaten

Braunostat® U : Art.-Nr. 0872 7902
 Dreifachnetzanschlussleitung : Art.-Nr. 0870 0141
 (siehe Abb. 6)

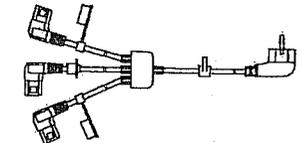


Abb. 6

9. Ersatzteile

Bei evtl. notwendig werdenden Reparaturen dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.

Abtropfglas : Art.-Nr. 3732 0076

B | BRAUN
 HOSPITAL CARE

B. Braun Melsungen AG
 Postfach 11 20
 D-34209 Melsungen
 Tel (0 56 61) 71 –0
 Fax (0 56 61) 71 20 44