

10. Juli, 2018

**Kontinuierliche Qualitätsverbesserung**• **Optimierte Zentrierscheibe für DBK**

• Dialog+ SW 9.xx

• Dialog iQ

**1. Betroffene Geräte**

Dialog+ SW 9.xx und Dialog iQ Geräte.

**2. Kontinuierliche Qualitätsverbesserung**

Die Zentrierscheibe A für die Drossel Bicarbonat Kartuschenhalter DBK für Dialog+ SW 9.xx Geräte mit Bicarbonat-Kartuschenhalter, bzw. für Dialog iQ Geräte wurde optimiert. Die neue Zentrierscheibe A hat abgeschrägte Kanten A1 und verhält sich dadurch im Entgasungsfluss stabiler und reduziert Vibrationen, bzw. Geräusche. Zusätzlich wurde die Zentrierscheibe A gedreht (Öffnung A2 oben).

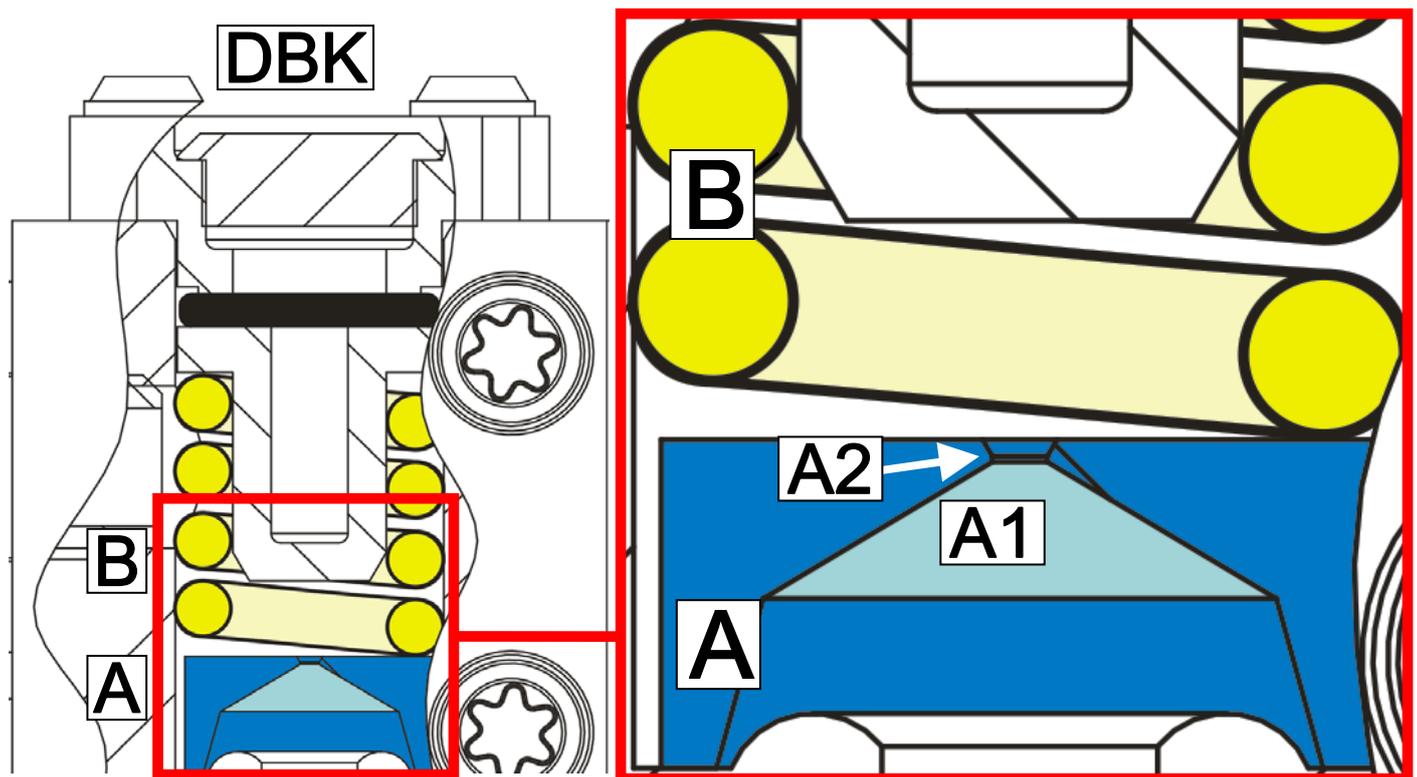


Abb. 1: DBK mit neuer Zentrierscheibe A

**3. Aktivitäten im Service**

Die Zentrierscheibe A muss gedreht werden, wenn durch Vibrationen hörbare Geräusche auftreten, oder ausgetauscht, wenn die Zentrierscheibe A beschädigt ist. Die Druckfeder B und die Position der Zentrierscheibe A ist in der Abbildung 1 dargestellt. Die flache Zentrierscheibe ist für Dialog+ Geräte mit Software 7.xx und 8.xx noch verfügbar.

**4. Bestellungen**

Die Zentrierscheibe mit abgeschrägte Kanten kann in Deutschland über die 08002272837 oder per E-Mail über [dialysetechnik.melsungen@bbraun.com](mailto:dialysetechnik.melsungen@bbraun.com) bestellt werden.

Art.-Nr.	Stck.	Beschreibung
34570888	5	Zentrierscheibe (für Dialog+ SW 9.xx/Dialog iQ)
34771050	10	Druckfeder
34771352	5	Zentrierscheibe (für Dialog+ SW 7.xx und SW 8.xx)

Mit freundlichen Grüßen

Michael Kay

Falls Sie weitere Fragen haben, können Sie uns über die deutsche Servicehotline 0800 22 72 831 erreichen.

B. Braun Avitum AG, 34209 Melsungen, Deutschland

Servicehotline: 08002272831 Ersatzteile: 08002272837 E-Mail: [dialysetechnik.melsungen@bbraun.com](mailto:dialysetechnik.melsungen@bbraun.com)

FSI\_2018\_03\_DialogP SW 9xx\_Dialog iQ\_DBK Zentrierscheibe\_DE.doc/pdf

Rev. 1.00.00/06 2018

**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTIS