

# Aesculap Neurocirugía

## Punzadora de hueso KAIRison neumática



**KAIRISON®**

### DESMONTAJE




**I** Hale hacia atrás el mecanismo de seguridad para liberar el vástago.



**II** Gire el vástago en dirección de la flecha.



**III** Desenganche el vástago y separelo del mango.

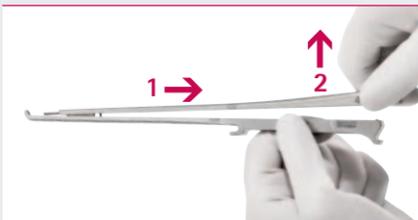

**IV** Hale el vástago hacia atrás (1) y levante la pieza deslizante (2).

#### Nota

- Punzones de hueso con un color dorado en el extremo distal o una manija interior de color dorado tiene una boca delgada. Estos punzones son para la eliminación de pequeñas piezas de hueso o tejido blando.
- Limpie el nuevo instrumento, ya sea manualmente o mecánicamente antes de la primera esterilización.
- Inspeccione el instrumento después de cada ciclo de limpieza y desinfección y antes de su uso con el fin de asegurarse de que esté limpio y funcionando correctamente, no este dañado y que no tenga componentes sueltos, doblados, rotos, agrietados, desgastados o fracturados. No use el instrumento si está defectuoso.
- Los punzones de hueso puede ser esterilizado tanto desarmados como armados.
- Por favor, siga las instrucciones para el desmontaje y montaje de la punzadora!

#### Limpieza, Desinfección y Esterilización

Después de cada uso:

- Limpiar el equipo contaminado tan pronto como sea posible. Realizar limpieza manual o mecánica. Siga las instrucciones del fabricante. Al llevar a cabo la limpieza mecánica, utilice cestas adecuadas para la limpieza (evita las marcas de agua).

Para mayor información refierase a los catálogos:



Mantenimiento Adecuado de Instrumental



C81902 Sistema Universal de Almacenaje Aesculap



C24302 Punzadoras de hueso KAIRison neumáticas

#### Después de cada uso

- Instrumentos desmontables deben ser desmontados, se recomienda la descarga en seco. Si el instrumento está reprocesado mientras está húmedo, use un desinfectante de limpieza activa. Antes de la limpieza mecánica, enjuague el instrumento en agua corriente.
- Coloque el instrumento en una solución desinfectante adecuada, de tal manera que todas las superficies, superficies interiores y las aberturas están cubiertas. Siga las instrucciones del fabricante del desinfectante.
- Después de la desinfección química, siempre aclarar el item a fondo con abundante agua corriente. Siga las instrucciones del fabricante del desinfectante.
- Retirar el material incrustado con un cepillo suave de nylon. No utilice productos de limpieza ásperos o cepillos metálicos. Limpiar los canales con un cepillo de nylon suave y redondo. Use cepillos que son de un diámetro adecuado para las partes complejas que se deben limpiar.
- Lleve a cabo el enjuague final en agua destilada o totalmente desmineralizada.
- Seque el instrumento con un paño suave y absorbente, libre de pelusa. Seque los canales con aire comprimido.

- Partes móviles, tales como bisagras y los cierres deben ser lubricados con un aceite permeable y esterilizable (como el aceite de AESCULAP STERILIT JG598).
- La esterilización se tiene que hacer de acuerdo a un procedimiento de esterilización por vapor validadas (por ejemplo, en un esterilizador de conformidad con la norma EN 285/ANSI/AAMI/ISO 11134-1993, ANSI / AAMI ST46-1993, y validado en conformidad con la norma EN 13683 554/ISO ). En caso del procedimiento de vacío fraccionado, la esterilización tiene que ser por un mínimo de 5 minutos a 274 ° F/134 ° C ya una presión de 2 bar.

#### Posición de boca 130°, hacia arriba

| Ancho | Long. vástago 235 mm | Long. vástago 285 mm |
|-------|----------------------|----------------------|
| 2 mm  | FK882R               | FK892R               |
| 3 mm  | FK883R               | FK893R               |
| 4 mm  | FK884R               | FK894R               |
| 5 mm  | FK885R               | FK895R               |
| 6 mm  | FK886R               | FK896R               |




Lubricar los lugares definidos en el instrumento (la mandíbula e interruptor rojo) con aceite Aesculap Sterilit JG598 después de cada ciclo de limpieza.

- Cuando se esterilizan varios productos a la vez en un esterilizador de vapor: asegúrese de que no se supere la carga máxima permitida como se especifica en la información del fabricante.

#### Almacenamiento


- Mantenga los instrumento en una bandeja de almacenamiento adecuada y almacenar en un lugar seco, limpio y seguro.

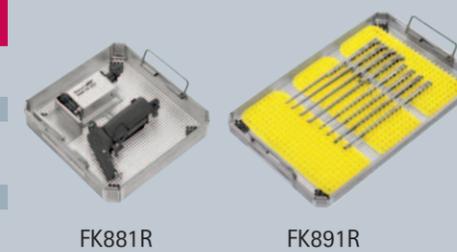

#### Componentes individuales

- FK899R Mango neumático
- FK898R Reductor de presión
- FK887R Cajetín para reductor de presión
- FK888SU Tubos descartables
- GA466 Manguera neumática con conexión Aesculap-Dräger
- GA468 Manguera neumática con conexión Aesculap-Schrader

### MONTAJE

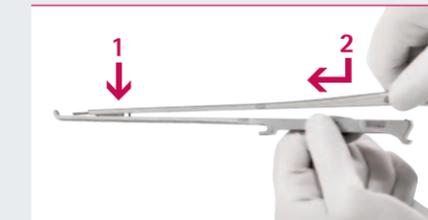

**I** Inserte el eyector (1), presione hasta que la bola enaje en su lugar (2).



**II** Verifique posición y enganche el vástago con el mango.



**III** Gire el vástago hacia el mango.



**IV** Verifique la posición correcta del mango antes de utilizar.

**B. BRAUN**  
SHARING EXPERTISE

B. Braun Ecuador  
Manuel Ambrosi E4-120 y los Cipreses, Quito  
Telf: +593 2-2481-200, Fax +593-2 481-200