

Aesculap Neurocirugía

Punzadora de hueso KAIRison neumática




KAIRISON®

GUIA RAPIDA


www.aesculap-neuro.com

- I Lea las instrucciones de uso
- I Coloque el switch en OFF
- I Tenga suministro de aire comprimido de no menos de 7 bar disponible
- I Conecte la manguera al suministro de aire comprimido

I Preparación

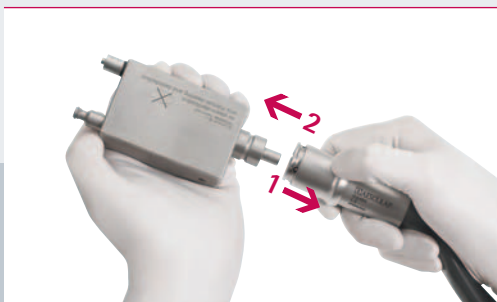

II Conecte la manguera de aire al regulador de presión

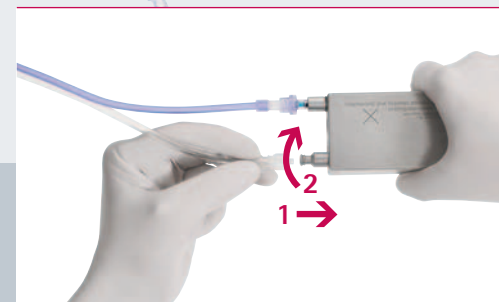

III Conecte el set de tubos al regulador de presión (Luer lock)



IV Conecte los tubos al mango



V Verifique la posición del vástago y enganchelo con el mango



VI Gire el vástago hacia el mango hasta oír el click



VII Coloque el switch en ON



! Active la vara de seguridad para cada limpieza de la boca

Para mayor información refírase a los catálogos:



C24301 Punzadora KAIRison neumática



C25411 KAIRison poster de reprocesamiento

Posición de boca 130°, hacia arriba

Ancho	Long. vástago 235 mm	Long. vástago 285 mm
2 mm	FK882R	FK892R
3 mm	FK883R	FK893R
4 mm	FK884R	FK894R
5 mm	FK885R	FK895R
6 mm	FK886R	FK896R

Componentes individuales

FK899R	Mango neumático
FK898R	Reductor de presión
FK887R	Cajetín para reductor de presión
FK888SU	Tubos descartables
GA466	Manguera neumática con conexión Aesculap-Dräger
GA468	Manguera neumática con conexión Aesculap-Schrader

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Aesculap AG & Co. KG

Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, Germany
Phone +49 7461 95-0, Fax +49 7461 95-2600
www.aesculap.de