


# Sangustop®

## Applikation


### Einfache Handhabung

- ▶ Öffnen der Peel Verpackung.
  - ▶ Sangustop® Vlies auf die erforderliche Größe der blutenden Fläche zuschneiden.
  - ▶ Sangustop® ist sofort einsatzbereit, NICHT anfeuchten!
  - ▶ Vlies entnehmen und mit sauberen, trockenen Handschuhen oder trockener Kompresse / Stieltupfer sanft auf die blutende Fläche drücken bis das Vlies an der Blutungsstelle haftet.\*
  - ▶ Sangustop® ist beidseitig anwendbar.
  - ▶ Bei größeren Flächen zwei oder mehr Sangustop® Vliese nebeneinander auflegen. Es ist nicht nötig, Sangustop® überlappend aufzubringen.
  - ▶ Nach erfolgter Blutstillung kann das Vlies bei Bedarf wieder entfernt werden, ohne weitere Blutungen hervorzurufen.
  - ▶ Sangustop® enthält keine humanen Komponenten und ist deshalb nicht dokumentationspflichtig.
- \* Aufgrund der hohen Thrombozytenaffinität von Kollagen kann Sangustop® an blutbenetzten Handschuhen und Instrumenten anhaften.

### Laparoskopische Anwendung

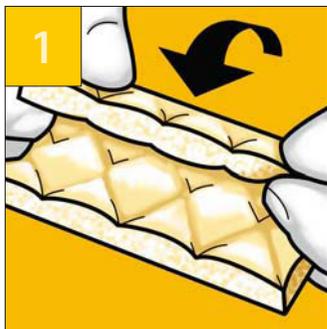

Aufrollen des trockenen Sangustop® Vlieses über die lange Kante (Größe 5 x 8 cm bei Bedarf einmal durchschneiden).

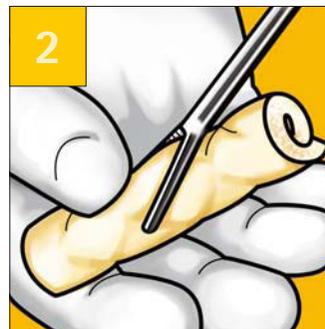

Fassen des eingerollten Vlieses mit atraumatischer Faszange.

**Tipp:**  
Mittig oder vorne fassen.



Einföhren und durchschieben durch den 10 mm oder 12 mm Trokar.

Nach Entföhlung im Bauchraum Sangustop® sanft mit der Faszange oder trockenem Stieltupfer auf die blutende Fläche andröcken.

**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE

Sangustop®

# Sangustop<sup>®</sup>

Hämostyptikum für die Viszeralchirurgie

Resorbierbares, mikroporöses, hochverdichtetes Kollagenvlies



Größe	Inhalt	Artikel-Nr.
5 cm x 8 cm	1 Stück	1069400
5 cm x 8 cm	2 Stück	1069550
5 cm x 8 cm	4 Stück	1069500
3 cm x 5 cm	4 Stück	1069600

**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE