



POWER SYSTEMS

AESCULAP[®] Acculan[®] 4 KLEINE BOHRMASCHINE

SEHEN. SPÜREN. ERLEBEN.

AESCULAP® Acculan® 4 KLEINE BOHRMASCHINE

SEHEN. SPÜREN. ERLEBEN.



Ac

Acculan® 4 kleine Bohrmaschine –
Eine Maschine, die Sie von der
ersten Sekunde an begeistern wird.

Alle Maße und technischen Daten in diesem Katalog sind Nennmaße, welche anerkannten fertigungsbedingten Toleranzen unterliegen und sind vorbehaltlich technischer Änderungen.

Als einer der führenden Anbieter im Bereich Motorensysteme bietet AESCULAP® Lösungen für viele Indikationsgebiete.

Unsere Philosophie ist es, durchdachte Systeme zu entwickeln, die den Klinikalltag vereinfachen – für den Chirurgen während der Operation, für das OP-Team beim Handling und für die AEMP (ZSVA) bei der Wiederaufbereitung. Mit der Acculan® 4 kleinen Bohrmaschine haben wir uns dieser Herausforderung neu gestellt.

Sie bekommen eine Maschine in die Hand, die Sie von der ersten Sekunde an begeistern wird. Schon beim Anfassen können Sie den Unterschied spüren:

- Die Maschine lässt sich durch ihre runde, ergonomische Form hervorragend führen.
- Sie liegt durch den im Griff integrierten Akku gut in der Hand.
- Das Gehäuse aus Titan besticht durch seine Eleganz.

Die Acculan® 4 kleine Bohrmaschine ist die neueste Ergänzung der Acculan® Familie.

Sie orientiert sich insbesondere an den Belangen traumatologischer Eingriffe und liegt dabei angenehm in der Hand des Operateurs.

Darüber hinaus fügt sich das neueste Familienmitglied optimal in das bestehende Acculan® Produktprogramm ein, da eine Nutzung des bisherigen Acculan® 3Ti Ladegerätes GA677 und des kleinen Acculan® 3Ti Akkus GA666 möglich ist.

Acculan® 4

ERLEBEN SIE ES SELBST

Die Acculan® 4 kleine Bohrmaschine ist eine leistungsstarke und einfach bedienbare Maschine, die Zuverlässigkeit, Lebensdauer und Ergonomie in sich vereint.

Die Acculan® 4 kleine Bohrmaschine GA344 ist das Herzstück des neuen Systems.

Dank ihres leistungsstarken Motors bietet sie ein breites Anwendungsspektrum welches von der Kleinfragment-Osteosynthese bis hin zur aufgetriebenen Marknagelung reicht. Dies wird ermöglicht durch eine Vielzahl an verfügbaren Aufsätzen.

AESCULAP® Acculan® 4 KLEINE BOHRMASCHINE

SEHEN. SPÜREN. ERLEBEN.



Ac

Die verschiedenen Aufsätze ermöglichen Ihnen einen flexiblen Einsatz des Systems.

DIE Acculan® 4 KLEINE BOHRMASCHINE FÜHRT KONSEQUENT DIE PHILOSOPHIE DER Acculan® FAMILIE FORT:

DER UNTERSCHIED LIEGT IM DETAIL

AESFULAP® war Pionier bei der Einführung eines unsterilen Akkus. Hierbei wird nicht nur die Sterilisation der temperaturempfindlichen Akkuzellen vermieden. Durch die Integration der kompletten Steuerelektronik in den Akku wird auch diese nicht der Belastung durch Hitze und Feuchtigkeit ausgesetzt. Dies wiederum wirkt sich positiv auf die Lebensdauer und damit auch auf die Betriebskosten des Systems aus. Ein Konzept, das sich bereits seit Jahren bewährt hat. Durch die Möglichkeit des Akkuzellenaustauschs zum Festpreis und der Weiterverwendung von Elektronik und Gehäuse schonen Sie die Umwelt und Ihr Budget.

MASCHINELLE AUFBEREITUNG

Dank des Titangehäuses und der separat erhältlichen ECCOS® Lagerung können Acculan® Maschinen maschinell mit alkalischen Reinigungsmedien aufbereitet werden. Durch unsere Spüladapter bieten wir Ihnen eine einfache Möglichkeit zur maschinellen Innenreinigung von Lumen.

SERVICE-STEMPEL

Um sicherzustellen, dass Motorsysteme dauerhaft zuverlässig arbeiten, ist eine regelmäßige präventive Instandhaltung wichtig. Mit dem Service-Stempel auf der Maschine macht es Ihnen AESFULAP® einfach zu erkennen, wann die nächste präventive Instandhaltung erfolgen soll.

cculan® 4

AUFSÄTZE

Die verschiedenen Aufsätze für die Acculan® 4 kleine Bohrmaschine ermöglichen Ihnen einen flexiblen Einsatz des Systems ohne dabei Abstriche hinsichtlich Bedienkomfort und Leistung machen zu müssen.

- Durch die Getriebeaufsätze passt sich die Acculan® 4 kleine Bohrmaschine dem Einsatzbereich an – schnell zum präzisen Bohren und kraftvoll für das Markraumbohren.

- Kompatibel zu den gängigen Fräs- und Bohrwerkzeugen durch Aufsätze für AO-klein, AO-groß, Dental, Zimmer, Hudson und AESFULAP® Sechskant.

- Einfache Unterscheidbarkeit von Bohr- und Fräsaufsätzen durch Farbcodierung der Entriegelungshülse:

Bohren = schwarz
Markraumbohren = grün.

- Ein Kirschner Draht Futter für alle gängigen Durchmesser.

- Sagittalsägeaufsatz für Sägearbeiten bis zu einer Sägeblattnutzlänge von 50 mm mit schlüsselloser Sägeblattkupplung.

- Adapter kompatibel mit dem röntgenstrahlendurchlässigen Winkelgetriebe der Firma Synthes 511.300.

AESCULAP® Acculan® 4 KLEINE BOHRMASCHINE

SYSTEMÜBERBLICK

GA344	Acculan® 4 kleine Bohrmaschine (inkl. Steriltrichter GA678, Ölsprayadapter GB600880, Spickdrahtschutzhülse GA344244, Spüladapter GA344211)
GA666	NiMH Akku kurz
GA675	Verschlussdeckel
GA677	Ladegerät (ohne Netzkabel)
GB870R	Fräsaufsatz großes Dreibackenfutter (Ø 0,5 - 7,4 mm)
GB871R	Markraumbohraufsatz AO-groß
GB872R	Markraumbohraufsatz Hudson / Zimmer
GB878R	Bohraufsatz für Synthes röntgenstrahlendurchlässiges Winkelgetriebe 511.300
GB881R	Bohraufsatz großes Dreibackenfutter (Ø 0,5 - 7,4 mm)
GB882R	Bohraufsatz kleines Dreibackenfutter (Ø 0,5 - 4,0 mm)
GB884R	Bohraufsatz AO-klein
GB886R	Bohraufsatz AESCULAP® Sechskant
GB887R	Bohraufsatz Dentalschaft
GB891R	Sagittalsägeaufsatz (für Sägeblätter mit max. Nutzlänge von 50 mm)
GB894R	Spickdrahtaufsatz (Ø 0,6 - 3,2 mm)
GB257R	ECCOS® Set für Acculan® 4 kleine Bohrmaschine und 5 Aufsätze
GB715R	ECCOS® Halterung für 1 Aufsatz
GB716R	ECCOS® Halterung für 3 Aufsätze
GB600	Sterilit® Ölspray 
TA011944	Reinigungsbürste



SÄGEBLÄTTER



				
GP501R	15,0 mm	5,0 mm	0,5 mm	0,5 mm
GP502R	15,0 mm	10,0 mm	0,5 mm	0,5 mm
GP504R	20,0 mm	5,0 mm	0,5 mm	0,5 mm
GP505R	20,0 mm	10,0 mm	0,5 mm	0,5 mm
GP514R	25,0 mm	5,0 mm	0,5 mm	0,7 mm
GP515R	25,0 mm	10,0 mm	0,5 mm	0,7 mm
GP516R	25,0 mm	15,0 mm	0,5 mm	0,7 mm
GP518R	35,0 mm	10,0 mm	0,5 mm	0,5 mm
GP521R	35,0 mm	5,0 mm	0,5 mm	0,5 mm
GP522R	35,0 mm	10,0 mm	0,5 mm	0,7 mm
GP523R	35,0 mm	15,0 mm	0,5 mm	0,7 mm
GP524R	35,0 mm	20,0 mm	0,5 mm	0,7 mm
GP535R	50,0 mm	10,0 mm	0,5 mm	0,8 mm
GP536R	50,0 mm	15,0 mm	0,5 mm	0,8 mm
GP537R	50,0 mm	20,0 mm	0,7 mm	0,9 mm
GP538R	50,0 mm	25,0 mm	0,7 mm	0,9 mm
GP539R	50,0 mm	30,0 mm	0,7 mm	0,9 mm
GP511R	10,0 mm	10,0 mm	0,5 mm	Tiefenstopp 10 mm

Weitere Sägeblätter siehe Prospekt O17599.

Vertrieb Österreich

B. Braun Austria GmbH | Aesculap Division | Otto Braun-Straße 3-5 | 2344 Maria Enzersdorf
Tel. +43 2236 46541-0 | Fax +43 2236 46541-177 | www.bbraun.at

Vertrieb Schweiz

B. Braun Medical AG | Aesculap Division | Seesatz 17 | 6204 Sempach
Tel. +41 58258 5000 | Fax +41 58258 6000 | www.bbraun.ch

AESCULAP® – a B. Braun brand

Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Deutschland
Tel. 07461 95-0 | Fax 07461 95-2600 | www.aesculap.de

Hersteller nach MDD 93/42/EWG

Die Hauptproduktmarke „Aesculap“ und die Produktmarken „Acculan“, „ECCOS“ und „Sterilit“ sind eingetragene Marken der Aesculap AG.

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Information über unsere Erzeugnisse verwendet werden. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.