



Histoacryl® Gewebekleber

Was Sie über Histoacryl® wissen sollten



- Histoacryl® Gewebekleber ist ein spezieller medizinischer Kleber zur Behandlung glatter Hautwunden.
- Die geklebete Wunde sollte 5 Tage trocken gehalten werden. Ein **kurzer** Wasserkontakt wie z.B. während des Duschens ist möglich.
- Falls ein Verband angelegt wurde, kann dieser nach 5 Tagen entfernt werden.
- Sollte Ihnen die Wunde Schwierigkeiten bereiten, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt.
- Auf der Wunde bildet sich ein Schutzfilm, der sich beim Waschen von selbst ablöst. **Bitte nicht zupfen!**
- Histoacryl® bietet Ihnen im Vergleich zur herkömmlichen Wundversorgung ein sehr gutes kosmetisches Ergebnis.