


Zur nervenschonenden Netzfixierung –
in der laparoskopischen Hernienchirurgie

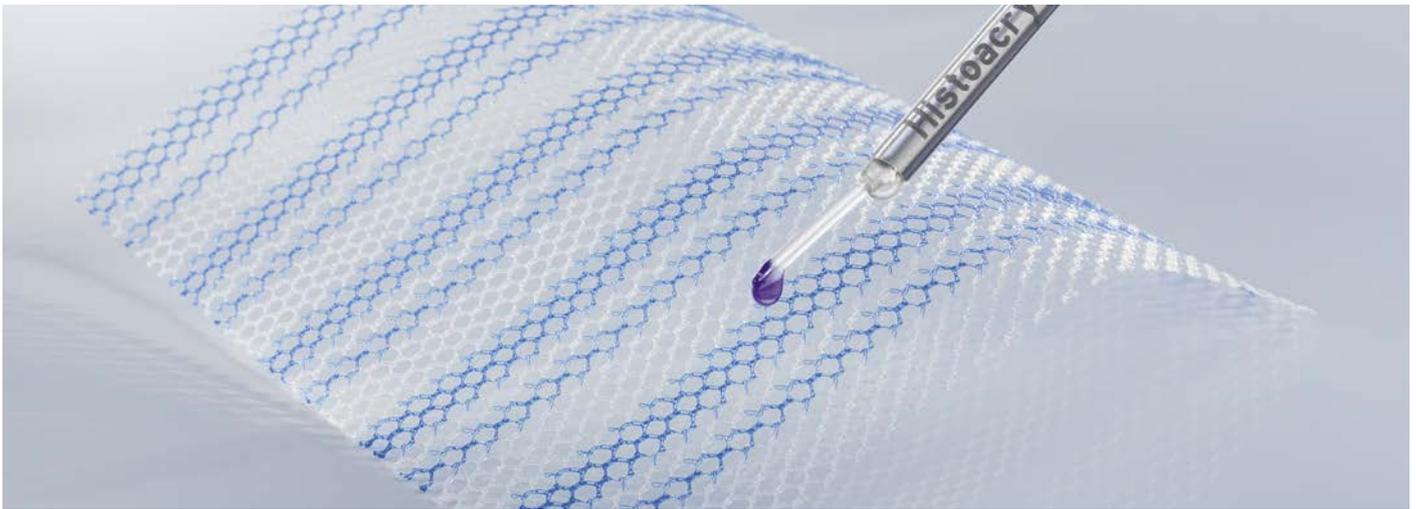

- Punktueller Auftrag – Wenige Tropfen ausreichend.
- Zurückziehen des Applikationssystems vor Setzen eines neuen Fixierungspunktes, um ein Verkleben der Kanülenspitze zu vermeiden – Bei Verstopfung der Kanülenspitze während der Anwendung: Herausziehen des Systems aus dem Patienten und Beseitigung der Verstopfung, indem die Spitze mit trockenem Mull abgerieben oder ein Teil abgeschnitten wird.
- Entfernung des Applikationssystems – Sicherstellung, dass die Kanülenspitze vor Entfernung von der Schutzhülle bedeckt ist, um eine Kontamination des Trokars mit Histoacryl®-Resten zu vermeiden. Dabei Festhalten der Schutzhülle am dicken Ende.



Bezeichnung	Artikel-Nr.	Inhalt
Histoacryl® Lap Mesh Fixation	1050165	5 x 0,5 ml Histoacryl® 5 x LapFix Applikator
	1052008	2 x 0,5 ml Histoacryl® 1 x LapFix Applikator




Abschrauben der Ampullen-
spitze von Histoacryl®.



Zurückziehen des grünen
Kolbens bis 2 ml Volumen vor-
handen.




Einführen der offenen Ampul-
lenspitze in den Spritzenkörper,
festes Zusammendrücken
der Histoacryl® Ampulle bis
sich der gesamte Inhalt in der
Spritze befindet.

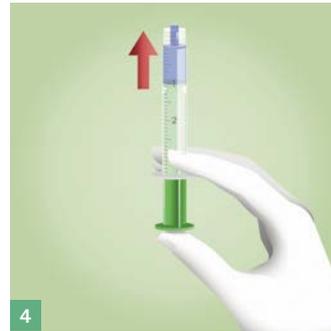

Entlüften der Spritze, bis
Histoacryl® Kleber die Spitze
der Spritze erreicht.



Befestigung der Kanüle an
der entlüfteten Spritze,
Festschrauben des Luer-Lock-
Anschluss.

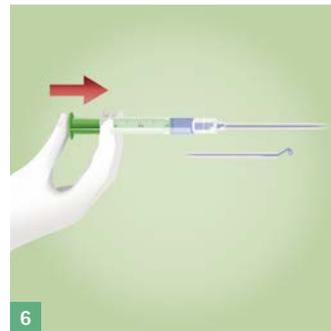

Vordrücken des grünen Kolbens
bis erster Tropfen Histoacryl®
in der Kanülenspitze erscheint.



Schieben der Schutzhülle über
die Spitze der Kanüle,
Einführen durch den Trokar.
Halten der Applikationsspitze
an den gewünschten
Fixationsbereich des Netzes,
vorsichtiges Drücken des
grünen Kolbens.

B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG | Tel.: (0 56 61) 9147-70 00 | E-Mail: naht.de@bbraun.com | www.bbraun.de
Betriebsstätte: Tuttlingen | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen

Hersteller nach MDD 93/42/EWG:

Histoacryl:
B. Braun Melsungen AG | Carl-Braun-Str. 1 | 34212 Melsungen | Deutschland

Die Produktmarke „Histoacryl“ ist eine eingetragene Marke der B. Braun Melsungen AG. Technische Änderungen vorbehalten.
Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Information über unsere Erzeugnisse verwendet werden. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.