

15. März, 2019

Kontinuierliche Qualitätsverbesserung**• Austausch PFV**

- Dialog iQ

1. Betroffene Geräte

Dialog iQ Geräte.

2. Kontinuierliche Qualitätsverbesserung

Die Gehäusegeometrie des PFV wurde verbessert, um die Belastung für die Membrane zu reduzieren, und damit die Notwendigkeit für den Austausch zu reduzieren.

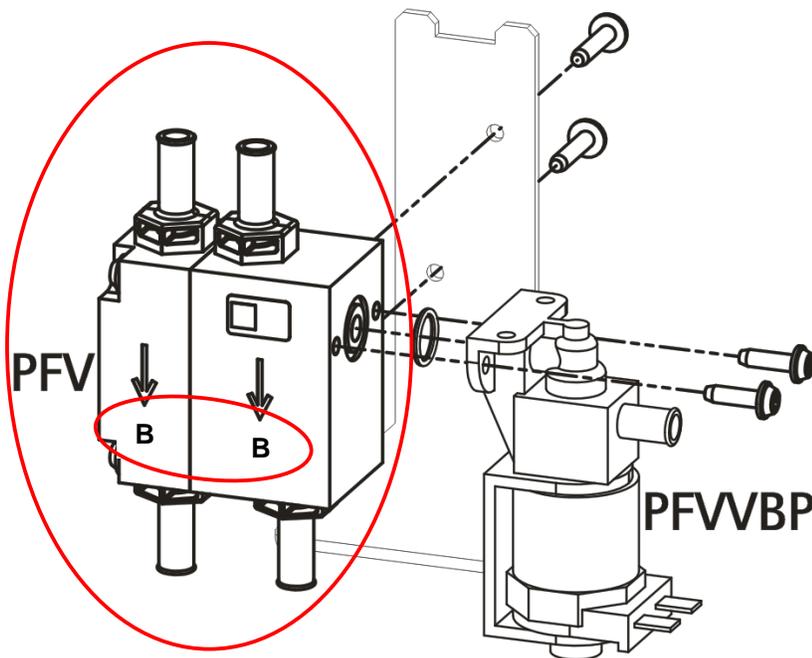


Abb. 1: PFV Gehäuse (modifiziertes Gehäuse am gravierten **B** erkennbar)

3. Aktivitäten im Service

Das komplette Gehäuse mit Membrane ist sobald wie möglich, spätestens während des nächsten Serviceeinsatzes, an allen betroffenen Dialog iQ auszutauschen, z.B. während der nächsten Wartung oder Reparatur.

Alle Dialog iQ Geräte ab den Seriennummern 000234 (Einzelpumpe) und 101315 (Doppelpumpe) sind schon ab Werk mit dem modifizierten PFV ausgestattet. Ein Austausch ist daher nicht erforderlich.

Die Vorgehensweise mit schrittweiser Anweisung ist im Packungshinweis beschrieben, der jedem PFV als Ersatzteil beiliegt. Das Ventil PFVBP und der O-Ring sind nicht enthalten und müssen vom alten auf das neue PFV umgebaut werden.

4. Bestellungen

Das modifizierte PFV kann in Deutschland über die Telefonnummer 0800 22 72 837 oder per E-Mail über dialysetechnik.melsungen@bbraun.com bestellt werden.

Art.-Nr. Stck. Beschreibung

3461079 1 PFV-Gehäuse

Mit freundlichen Grüßen

Günter Nissen

Falls Sie weitere Fragen haben, können Sie uns über die Servicehotline 0800 22 72 831 in Deutschland erreichen.

B. Braun Avitum AG, 34209 Melsungen, Deutschland

Servicehotline:08002272831 Ersatzteile:08002272837 E-Mail:dialysetechnik.melsungen@bbraun.com

FSI_2018_01.1_Dialog iQ_Austausch PFV_DE.doc/pdf

Rev. 1.01.00/März 2019

B | BRAUN
SHARING EXPERTIS