


Aesculap Endoscopic Technology


Challenger Ti-P



DEMONTAGE

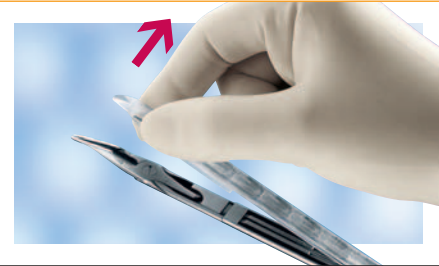


I Wenn sich das Clipmagazin noch im Schaft befindet, den Bedienhebel drücken. Jetzt kann das Clipmagazin entfernt und entsorgt werden.

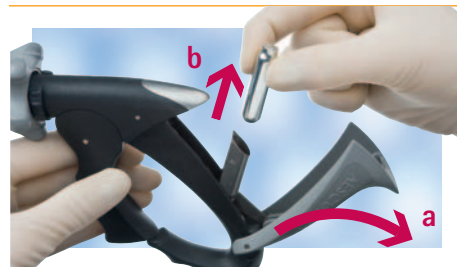


II CO₂ Patrone aus Handgriff entfernen.




III Den Sicherungsring so drehen, dass seine Öffnung in Richtung des Bedienhebels zeigt.

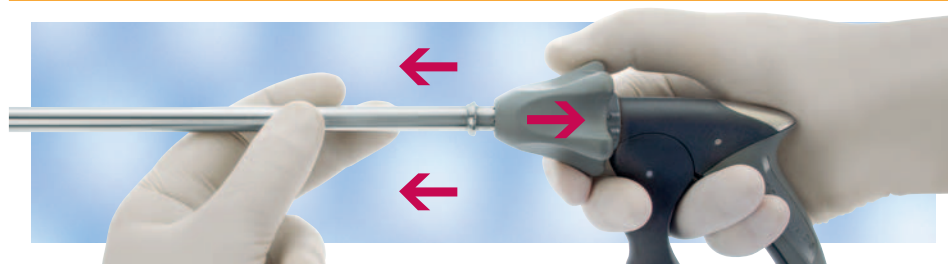

IV Schaft festhalten. Drehstern bis zum Anschlag zurückziehen. Dadurch wird der Sicherungsring zurückgeschoben und löst gleichzeitig den Schaft vom Griff. Schaft festhalten und aus dem Griff ziehen. Sicherungsring vom Griff entfernen.

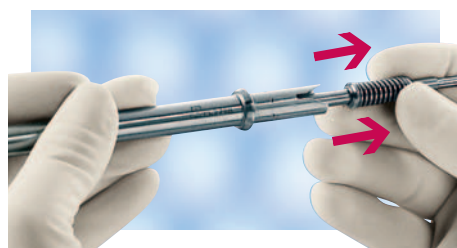


V Innenrohr mit Stange aus dem Schaft ziehen.

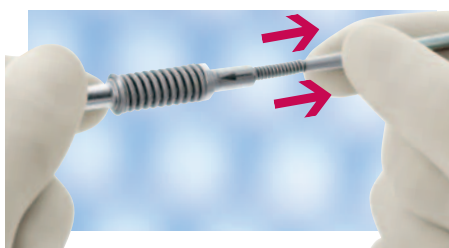

VI Stange aus dem Innenrohr ziehen.

PFLEGE

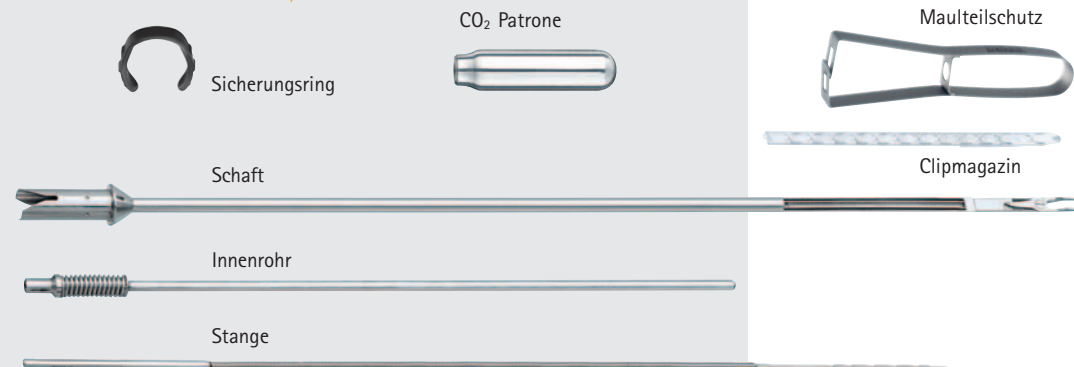

Handgriff benötigt keine Pflege mit Öl – nicht ölen.




Für eine reibungslose Funktion des Instruments alle beweglichen Teile und Gelenke des Schafts mit einem dampfdurchlässigen Öl (z.B. Aesculap STERILIT® I Ölspray JG600) ölen. Nach dem Ölen das Maulteil mehrmals durch Drücken des Bediehebels am Handgriff öffnen und schließen.




Immer den Maulteilschutz verwenden, um Beschädigungen der Maulteile während des Transports und der Aufbereitung zu vermeiden.

MONTAGE

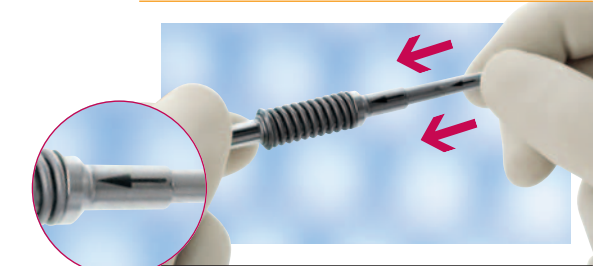


I Vor jedem Einsatz die Stange auf Risse, verbogene und abgebrochene Teile prüfen. Stange in das Innenrohr schieben.

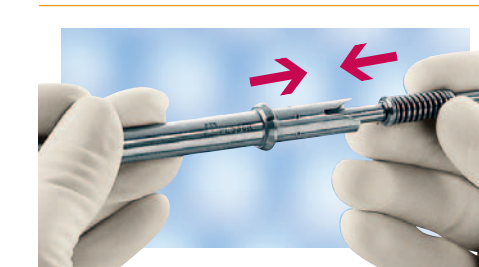

II Innenrohr mit der Stange in den Schaft einführen.



III Drehstern bis zum Anschlag zurückziehen und Schaft hineinschieben. Die Markierungen an Drehstern und Schaft müssen übereinstimmen. Drehstern danach wieder loslassen.

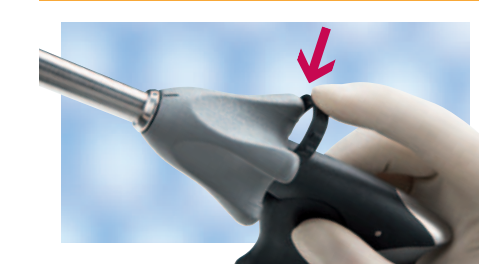

IV Sicherungsring von oben auf den Griff zwischen Drehstern und Bedienhebel anbringen.



V Sicherungsring um 180° verdrehen. Die Ringöffnung zeigt nach oben.

AUFBEREITUNG & ZUBEHÖR

- Kontaminiertes Produkt schnellstmöglich aufbereiten
- Für Hinweise zur Reinigung, Desinfektion und Sterilisation beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisung
- Das Produkt kann sowohl im zerlegten als auch zusammengebauten Zustand sterilisiert werden
- Aktuelle Informationen zur Aufbereitung siehe auch Aesculap Extranet unter www.aesculap-extra.net
- Zubehör und Ersatzteile siehe Prospekt C623 oder unter www.endoskopie-katalog.de

REPARATUR

Reparaturen dürfen nur von Personen durchgeführt werden, die von Aesculap hierzu ermächtigt wurden. Nur so bleiben Garantie und Gewährleistungsansprüche uneingeschränkt erhalten. Bei Reparaturen einschicken an: Aesculap Technischer Service, Am Aesculap-Platz, D-78532 Tuttlingen. Weitere Serviceadressen erfahren Sie über die oben genannte Adresse und über ats@aesculap.de

FUNKTIONSTEST


- Handgriff mit komplettem Schaft montieren. Bedienhebel des Handgriffs bis zum Anschlag durchdrücken und wieder loslassen.
- Schließen der Maulteile. Die Maulteile müssen parallel schließen und sich an ihren Spitzen berühren. Die Spitzen dürfen sich nicht überkreuzen. (Schereneffekt).
- Vor jedem Einsatz die Stange auf Risse, verbogene und abgebrochene Teile prüfen.
- Falls notwendig fehlerhafte Teile austauschen oder das Instrument zur Reparatur einschicken.

Aesculap Endoscopic Technology

Challenger Ti-P



AESCULAP®

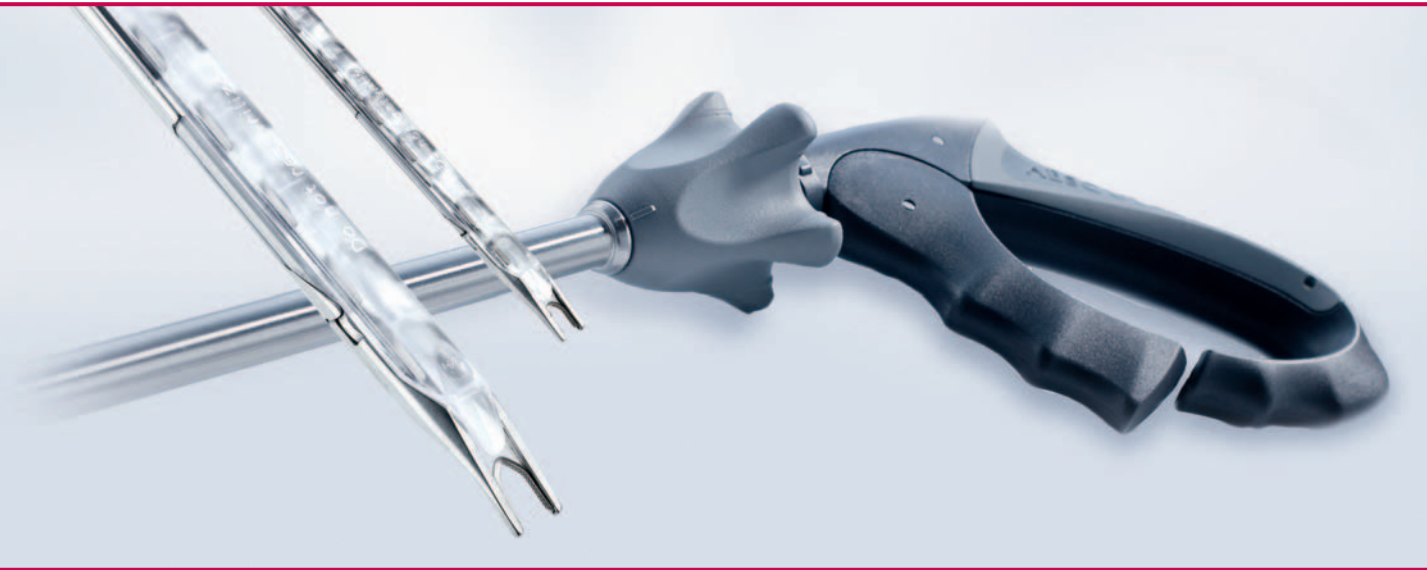

Anleitung zur Demontage und Montage

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Anbietung und dem An- und Verkauf unserer Erzeugnisse dienen. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Bei Missbrauch behalten wir uns Rücknahme der Kataloge und Preislisten sowie Regressmaßnahmen vor.

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Aesculap AG

Am Aesculap-Platz
78532 Tuttlingen
Deutschland

Telefon +49 7461 95-0
Fax +49 7461 95-2600

www.aesculap.de