

Introcan Safety®

Die Venenverweilkanüle für Ihre kleinen und kleinsten Patienten

Atraumatische Venenpunktion

Die einzigartige Schliffgeometrie ermöglicht das einfache Gleiten der Kanüle durch die Haut und in die Vene. Klinische Erfahrungen bei der Anwendung von Introcan Safety® und ergänzende Laboruntersuchungen konnten zeigen, dass auch in unterschiedlichen Winkeln der Punktionsschmerz deutlich reduziert wird.



Leichtgängiges Vorschieben des Katheters

Die optimierten Eigenschaften des Kathetermaterials und dessen Silikonisierung ermöglichen ein einfaches und sanftes Vorschieben des Katheters mit minimalem Kraftaufwand. Das transparente Kapillar mit eingebetteten Röntgenkontraststreifen ist in verschiedenen Längen, als PUR-(Polyurethan) oder FEP-(Teflon)-Variante, mit oder ohne Fixierflügel, erhältlich.



Polyurethan weist bei Körpertemperatur im Vergleich zu FEP eine höhere Flexibilität auf. Den klinischen Erfordernissen entsprechend stehen zwei Ausführungen, PUR und FEP, zur Wahl.

Ihre Vorteile

- Die beiden Blutrückfluss-Phasen ermöglichen die schnelle und sichere Bestätigung der korrekten Katheterplatzierung
- Komfortable Punktion in verschiedenen Winkeln
- Minimaler Kraftaufwand bei der Kathetereinführung
- Automatisch auslösender, passiver Sicherheits-Clip umschließt die Kanülenspitze beim Herausziehen
- Passiver Sicherheitsclip ermöglicht das leichtgängige Entfernen der Stahlkanüle bei gleichzeitig maximal reduziertem Risiko der Katheterdislokation und optimal an die Handhabung angepasster Gesamtlänge der Venenverweilkanüle



Doppelte Blutrückfluss-Technologie

Introcan Safety®


Die Venenverweilkanüle für Ihre kleinen und kleinsten Patienten

Ergonomisches Design für Patienten mit besonderen Venenverhältnissen

Patienten mit kleinen Venen und niedrigem venösen Blutdruck benötigen während der Infusionstherapie eine besondere Behandlung. Vor allem auf den Neugeborenen- und Kinderstationen ist die Anlage eines peripheren venösen Zugangs oft eine besondere Situation. Venenverweilkanülen für die Pädiatrie müssen nicht nur für die unterschiedlichen Anlageorte geeignet sein, sondern auch die technischen Voraussetzungen für die erfolgreiche Punktion kleiner Gefäße erfüllen.

Introcan Safety® wurde entwickelt, um Ihnen und Ihren kleinen Patienten während jeder Phase der Venenpunktion mehr Komfort zu gewährleisten. Die patentrechtlich geschützte, selbstauslösende Clip-Technologie minimiert das Risiko einer Nadelstichverletzung.


Speziell für Neugeborene ist nun auch Introcan Safety® 24G mit einem verkürzten Katheter von 14 mm erhältlich.

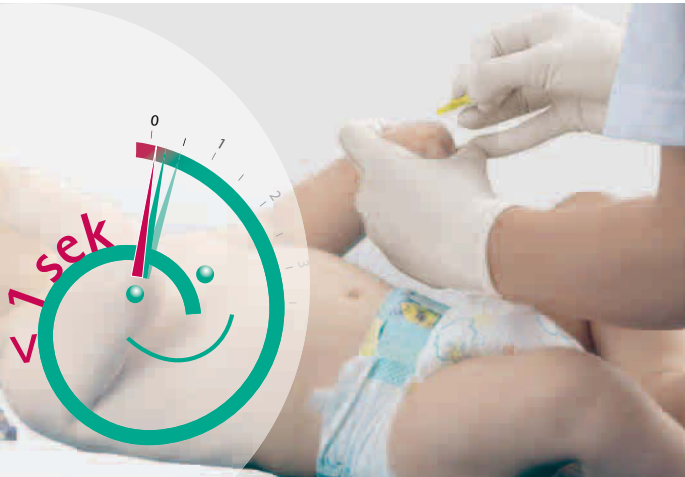

Schnell – 1. Blutrückfluss im transparenten Griffteil der Venenverweilkanüle

Schnelle Bestätigung für die korrekte Venenpunktion

Das im transparenten Griffteil der Venenverweilkanüle aufsteigende Blut bestätigt den Eintritt der Kanüle in die Vene. Dabei gewährleistet die neue Technologie – der vergrößerte innere Kanüledurchmesser der Introcan Safety® 24G – den schnellen Blutrückfluss.

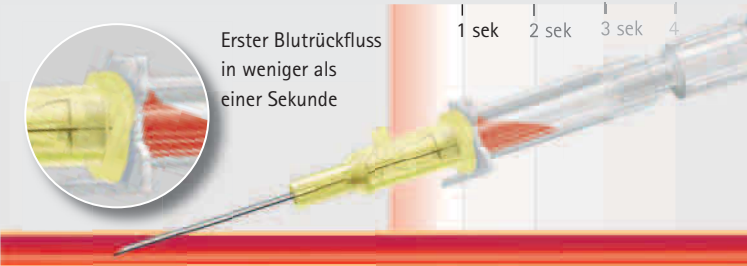

Zuverlässig – Blutrückfluss im Katheter

Zuverlässige Bestätigung der korrekten Katheterlage

Nach der erfolgreichen Venenpunktion wird der Katheter ca. 1 cm vorgeschoben. Der Blutrückfluss im Kapillar bestätigt die korrekte Lage des Katheters in der Vene.



Introcan Safety® Artikelnummer		Größe	Länge (mm)	Katheter Durchmesser (mm)	mit (W) oder ohne (S) Fixierflügel	Flow (ml/min)
Kathetermaterial FEP	PUR					
■ 4252500-01	4251601-01	24 G	19	0,7	S	22
■ 4254503-01	4253523-01	24 G	19	0,7	W	22
■	4251607-01	24 G	14	0,7	S	26
■	4251614-01	24 G	14	0,7	W	26

