



SeQuent[®] NEO

„Rapid Exchange“ PTCA Ballonkatheter

B. Braun Deutschland

Inhalt

Lösungsorientierte Angioplastie

- Produktportfolio

Läsionstherapie

- Indikationen
- Behandlungsempfehlung

SeQuent® NEO

- Übersicht
- Eigenschaften
- Vorteile

Sonstiges

- Ansprechpartner*in
- Datenschutz

Nachweise

- Literaturverzeichnis
- Bildverzeichnis

Glossar

Symbol-Übersicht



Dieses Symbol führt zum Inhaltsverzeichnis/zur Startseite



Dieses Symbol führt zum Literaturverzeichnis



Dieses Symbol führt zur Page (Website innerhalb der B. Braun City, die den kompletten Inhalt zum Thema sammelt)

Weitere mögliche Symbole




Website



PDF-Inhalte

Koronare Angioplastie

Produktportfolio

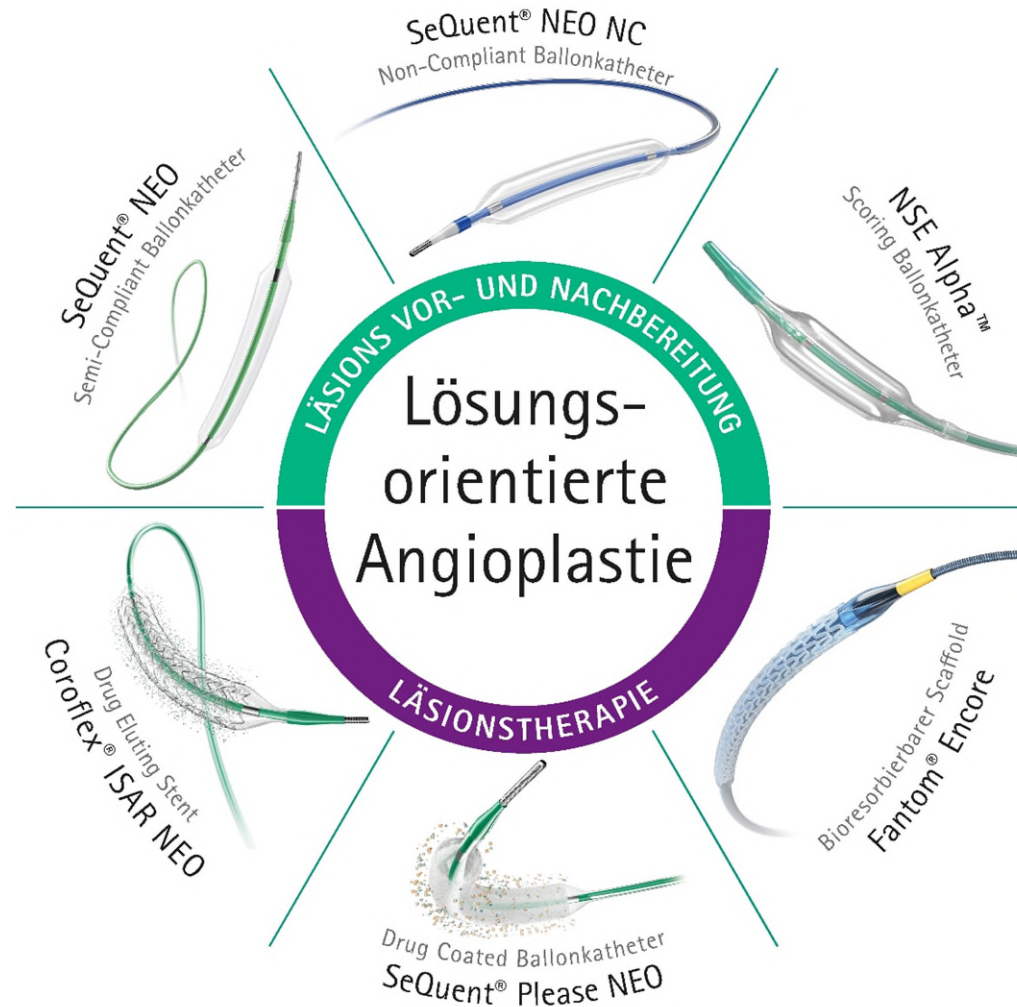

Wofür setzen Sie den
SeQuent® NEO ein?

Indikationen

SeQuent[®] NEO


Anerkannte Indikationen ^{1, 2, 3, 4:}

- Multi-Gefäßerkrankungen
- Komplexe Läsionen (Typ B2 & C Läsion)
- Extrem abgewinkelte Läsionen (> 60 %)
- Kleine Gefäße
- Re-Crossing möglich
- Kalzifizierte Gefäße
- Distale Zielläsionen



Behandlungsempfehlung

Leitfaden der Konsensgruppe

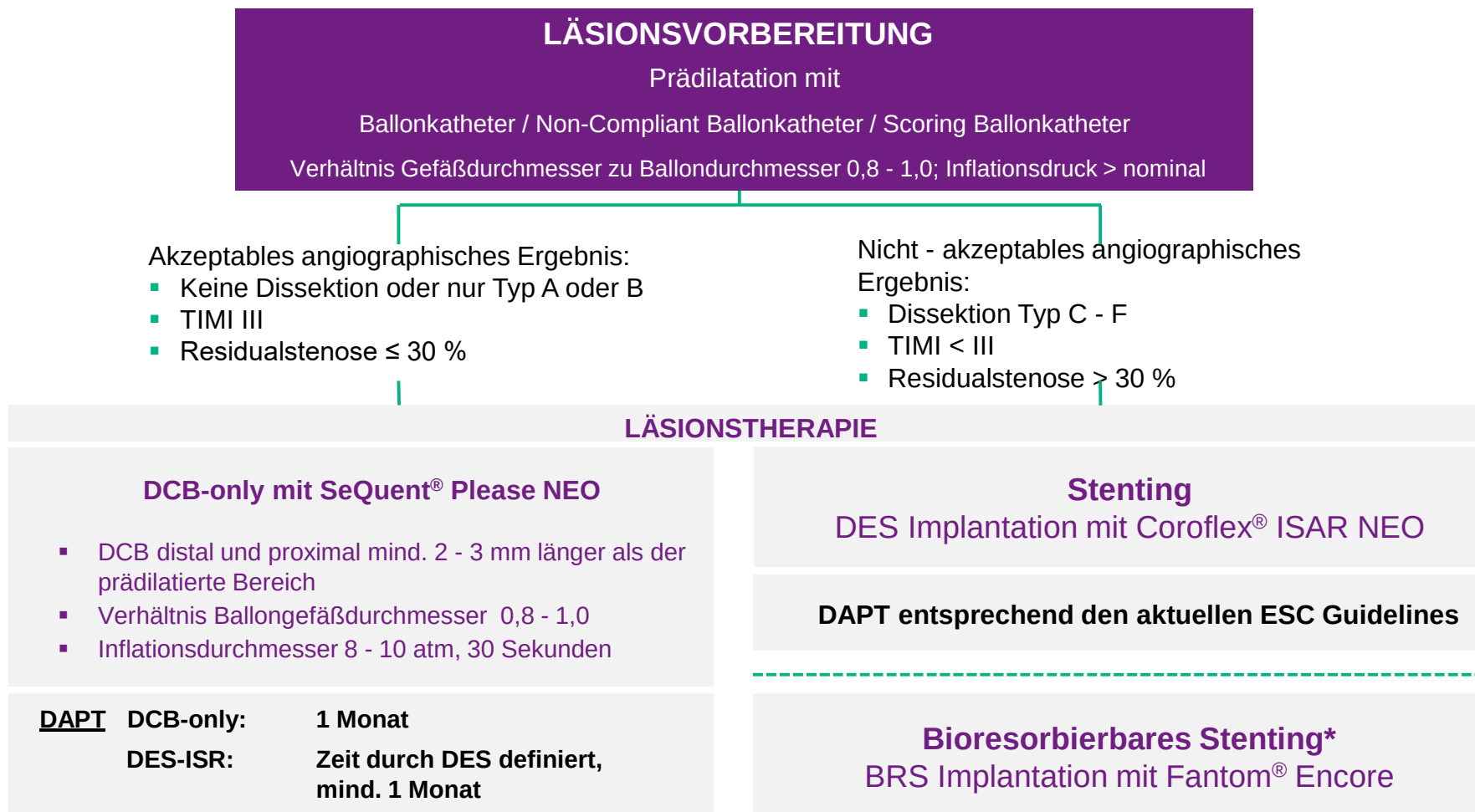

Übersicht

SeQuent® NEO

SeQuent® NEO



Eigenschaften

- Hydrophile Ballon- und Schaftbeschichtung
- Knickschutz am proximalen Schaft
- Crossing Profil (0,58 mm - 0,66 mm)
- 0,016“ dünnes Spitzenprofil
- CTO Ballons (Ø 1,25 mm und 1,50 mm)

Produktgrößen

1,25 – 4,0 mm Durchmesser

10 - 30 mm Länge

41 verschiedene Größen

Für kleine Gefäße: 1,25 - 3,0 mm

Für große Gefäße: 3,5 - 4,0 mm



Optimiertes Portfolio,
das eine Vielzahl von
Behandlungsoptionen
ermöglicht.

Eigenschaften

SeQuent® NEO

Vorschubstabilität

- Das stabile Design des Drahtausgangsbereiches unterstützt eine zuverlässige Handhabung und Passage der Stenose⁴

Hydrophile Beschichtung

- Erleichtert den Zugang zu Läsionen²
- Verbessert die Kathetersteuerung und den Vorschub selbst in stark gewundenen Gefäßverläufen⁴

„KissingBalloon“ Technik

- Spezielles Design des Katheterschaftes ermöglicht „Kissing Balloon“ Technik mit 6 F Führungskatheter

CTO Ballone (Ø 1,25 und 1,50 mm)

- Rated Burst Pressure bis zu 18 atm
- „Non-compliant“ Ballonkathetereigenschaften
- Mittig positionierter Röntgenmarker für mehr distale Flexibilität

Vorteile SeQuent® NEO

Produkteigenschaft

Hydrophile Ballon- und
Schaftbeschichtung³

Exzellente Vorschubstabilität⁴

Geringes Spitzen- und Ballonprofil⁴



Vorteil


Sehr gute Gleiteigenschaften für einen
leichten Zugang zur Läsion²

Sehr gute Kraftübertragung und
Führbarkeit vom Katheterhub bis in die
distale Spitze⁴

Hohe Flexibilität und Kurvengängigkeit

B. Braun Deutschland

Ihr Partner für die Angioplastie

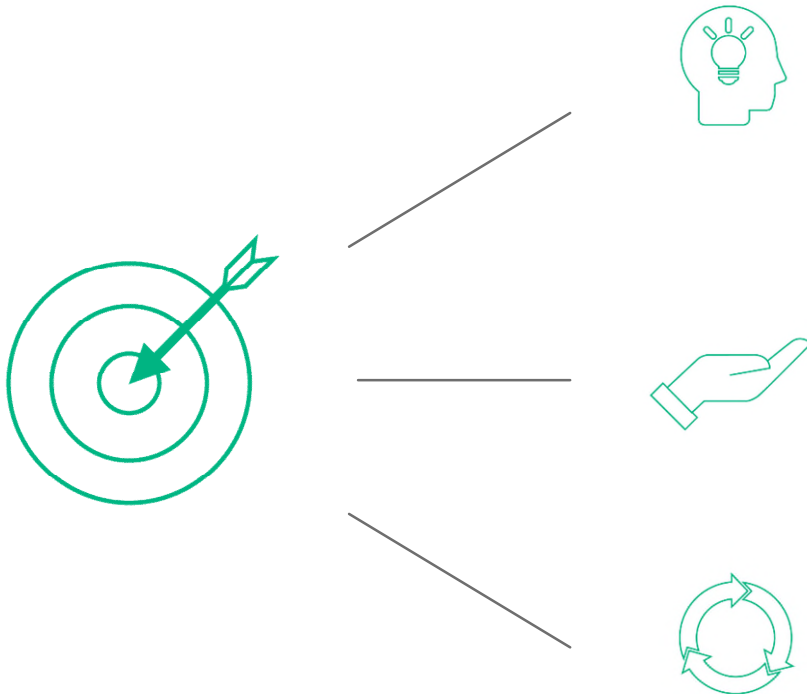

B. Braun verfügt über **jahrelange Erfahrung** im Bereich der koronaren Angioplastie.

SeQuent® NEO – Bewährtes Design für komplexe Anatomien

Wir bieten Ihnen ein **vollumfängliches Behandlungsportfolio** zur Behandlung von Herzkrankheiten im Zusammenspiel mit einer **bereichsübergreifenden Zusammenarbeit**.



Die in dieser Produktunterlage enthaltenen Angaben wurden sorgfältig geprüft. Dennoch kann die B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG keine Gewährleistung oder Garantie im Hinblick auf die Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten oder in Bezug genommenen Informationen geben.

Vor der Verwendung des Medizinproduktes / Arzneimittels sind in jedem Fall die Angaben in der jeweils gültigen Gebrauchsinformation oder Fachinformation zu beachten.



Nils Blumenthal
Group Product Manager Coronary Angioplasty

Telefon: +49 151 677 692 98

E-Mail: nils.blumenthal@bbraun.com



Datenschutz ist uns wichtig!

VERTRAUEN

Wir setzen auf eine vertrauensvolle Kooperation mit Ihnen und achten besonders auf einen verantwortungsbewussten Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten.



ZWECK DER VERARBEITUNG

Ihre Daten werden ausschließlich zur Dokumentation des Schulungsnachweises und der Zertifikatserstellung genutzt. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nicht.

IHRE RECHTE

Sie können die Einwilligung zur Speicherung Ihrer Daten zu Werbezwecken jederzeit widerrufen und haben als Betroffener ein Recht auf Auskunft, welche Daten wir von Ihnen erhoben haben.



IHR ANSPRECHPARTNER

Wenden Sie sich bitte unter der Angabe Ihrer Adresse per E-Mail an datenschutz-mv@bbraun.com. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie auf unserer Webseite www.bbraun.de/dsgvo.

Quellenverzeichnis

Literatur / Quellen

1. CER120905MW01, as well as the next updated versions with a novel Doc.No (CER 39.05.661- draft in progress)
2. Case Report Dr. Katsumi Ueno,
Department of Cardiology,
Matsunami General Hospital, Japan, "Utilizing the superior conformability of Coroflex® ISAR NEO for complex tortuous lesions"
3. PS121015TS01
4. TB180507TS01-V01- lesion access of catheters in comparison
- 5.
- 6.
- 7.